

<http://www.ajaxdent.com>

ajax

# Manual

*Installation manual*



**CE 0197 ISO13485:2003**

P/N: 8005746 Version: V1.1 Issue Date: 2009-05-12

# Содержание

---

## 1. Руководство по монтажу

|  |    |
|--|----|
| 1.0 Обложка                                      |    |
| 1.1 Предостережение                              | 01 |
| 1.2 Необходимые инструменты                      | 02 |
| 1.3 Описание кнопок управления                   | 03 |
| 1.4 Необходимые условия для монтажа              | 04 |
| 1.5 Выбор места монтажа и проверка внешнего вида | 05 |
| 1.6 Упаковка                                     | 06 |
| 1.7 Монтаж                                       | 07 |
| 1.8 Задняя обложка                               |    |



Обязательно прочитайте данное  
Руководство перед монтажем!

---

---

**Руководство по  
монтажу  
стоматологических  
установок АЈ 11, 12, 15**

---

---

**Версия : V1.0**

**Дата издания : 2009-05-11**

## 1.1 Предостережение













- Внимательно прочитайте данное руководство перед монтажем.
- Входящее напряжение установки 220-230 V ,50/60 Hz.

Убедитесь, что оборудование надежно установлено на полу.

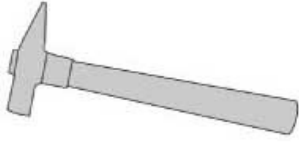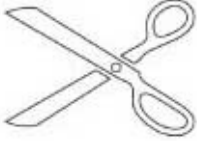











- Подсоединение всех электрокомпонентов должно производиться только уполномоченным техническим специалистом.
- Установка аксессуаров должна производиться только в пределах рекомендованного производителем списка.
- Установка не должна использоваться в условиях сверхвысоких температур, влажности, вибрации, высокого риска воспламенения, ненадежного крепления к полу, чрезмерной запыленности.
- Применению подлежат только рекомендованные производителем запасные части.
- Все движущиеся части установки не должны соприкасаться в пределах радиуса их движения с любыми другими предметами.
- Установка не должна использоваться в условиях сильных электромагнитных колебаний.

## 1.2 Необходимые инструменты


Подготовьте следующие инструменты для установки:.

|   |                      |   |                                  |
|---|----------------------|---|----------------------------------|
|    | Электродрель         |    | Кусачки                          |
|    | Молоток              |    | Ножницы                          |
|   | Уровень              |  | Плоская отвертка                 |
|  | Крестовая отвертка   |  | Набор угловых ключей 6-гранников |
|  | Набор гаечных ключей |  | Набор прямых ключей 6-гранников  |

## 1.3 Описание кнопок управления



| Символ  | Описание                  | Символ  | Описание  |
|---|---------------------------|---|---|
|    | Настройка                 |    | Спинка ВПЕРЕД   |
|    | Наполнение стакана        |    | Спинка НАЗАД  |
|    | Промывка<br>плевательницы |    | Кресло ВНИЗ   |
|   | Негатоскоп                |   | Кресло ВВЕРХ  |
|  | Осветительная лампа       | <b>R</b>  | Начальная позиция                                       |
|  | ВНИМАНИЕ                  | <b>LP</b>   | Позиция для<br>препарирования                           |
|  | Защитное заземление       |  | Регулировка водно-<br>воздушной мощности<br>наконечника |

## 1.4 Необходимые условия монтажа

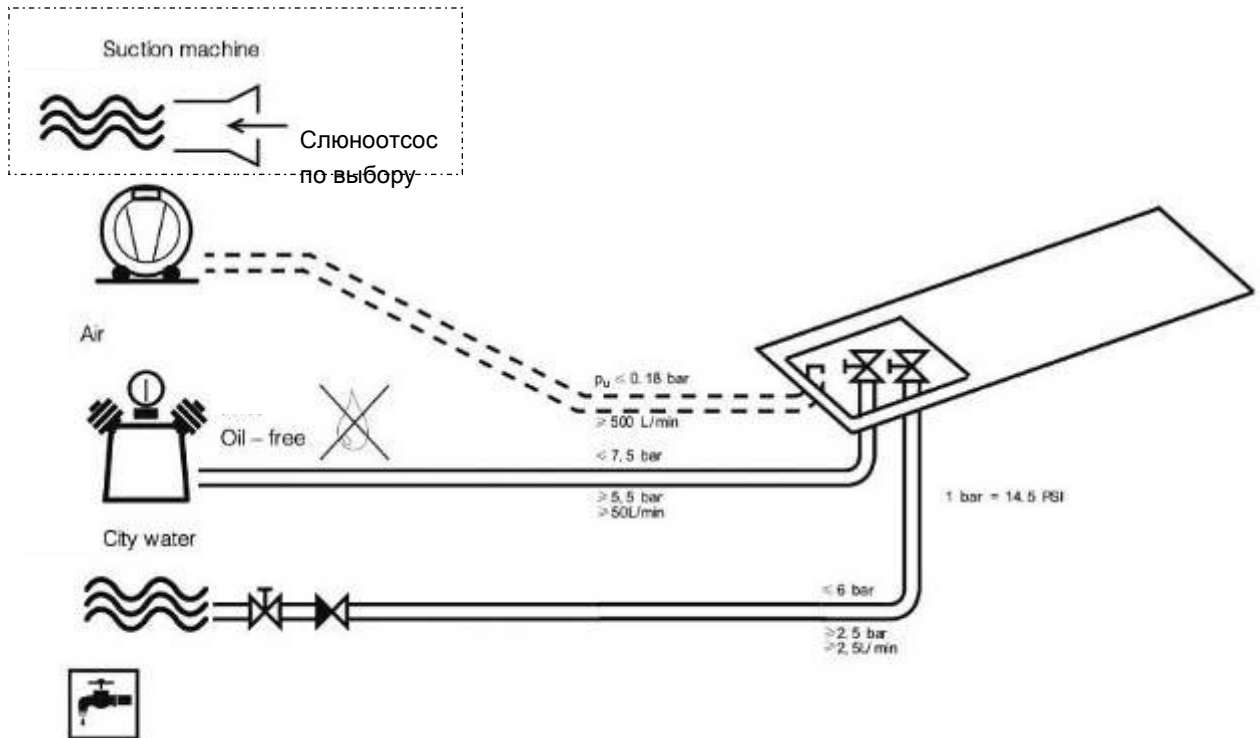



### Размеры отверстий для монтажа на станине установки

Отверстия для болтов для крепления к полу.

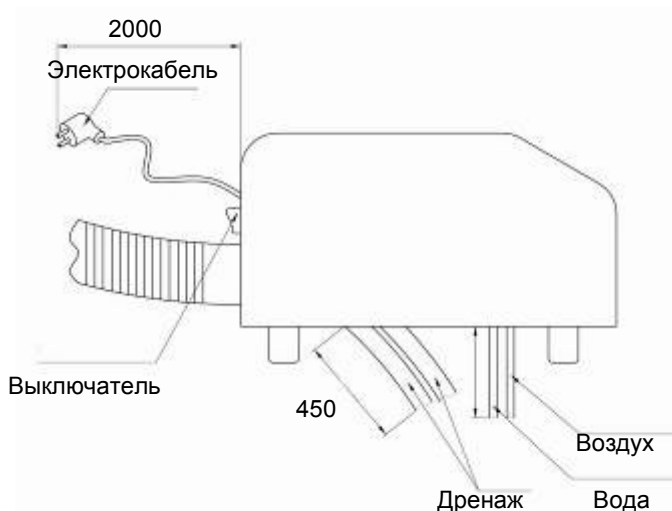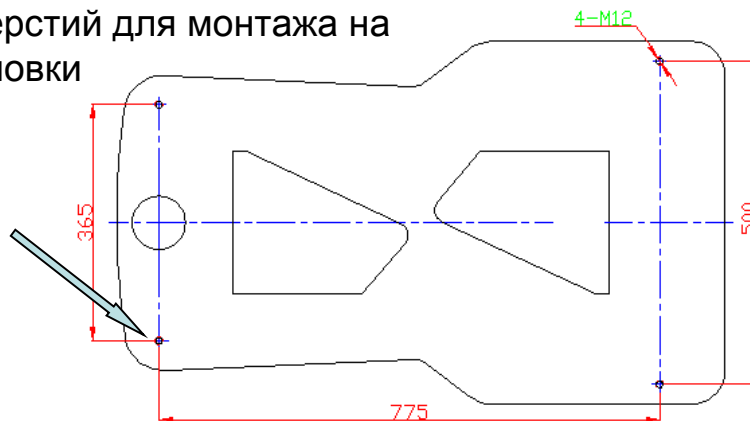


## 1.5 Выбор места монтажа и проверка внешнего вида

Высота потолка рабочего кабинета должна быть не менее 2200мм.

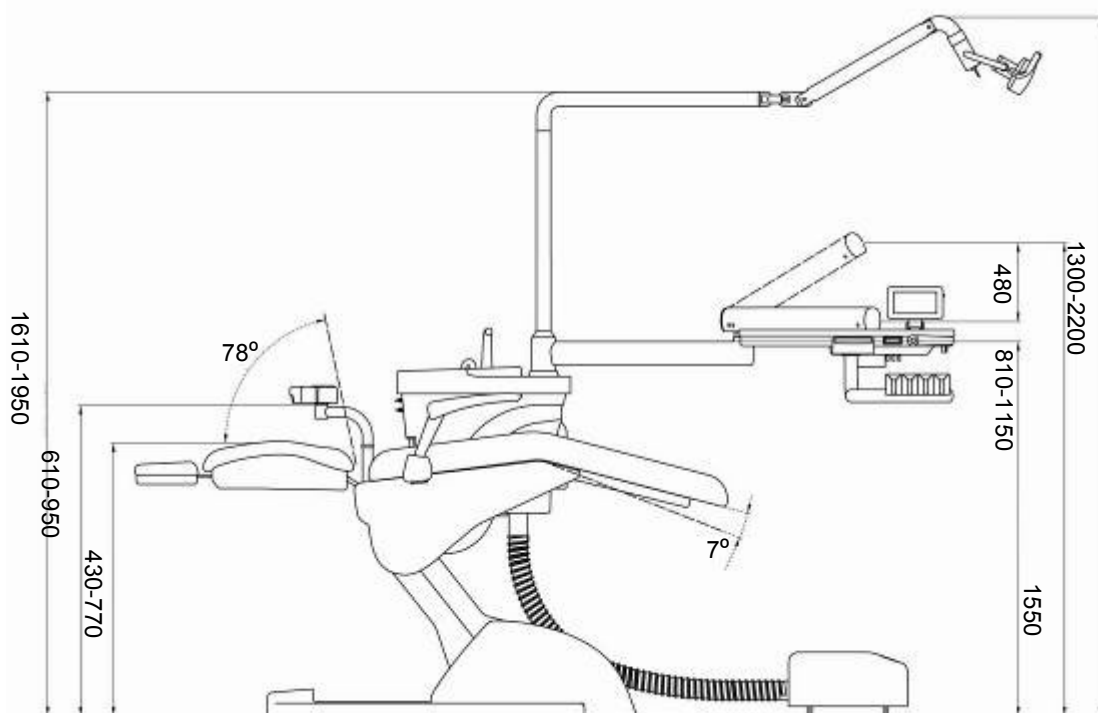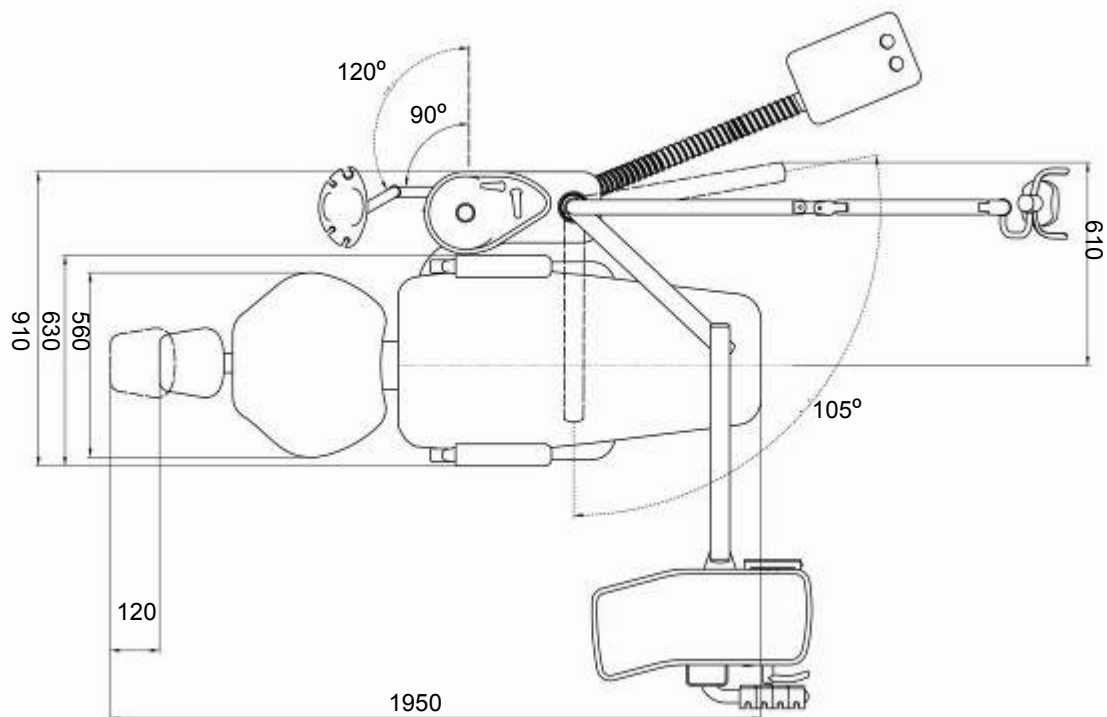




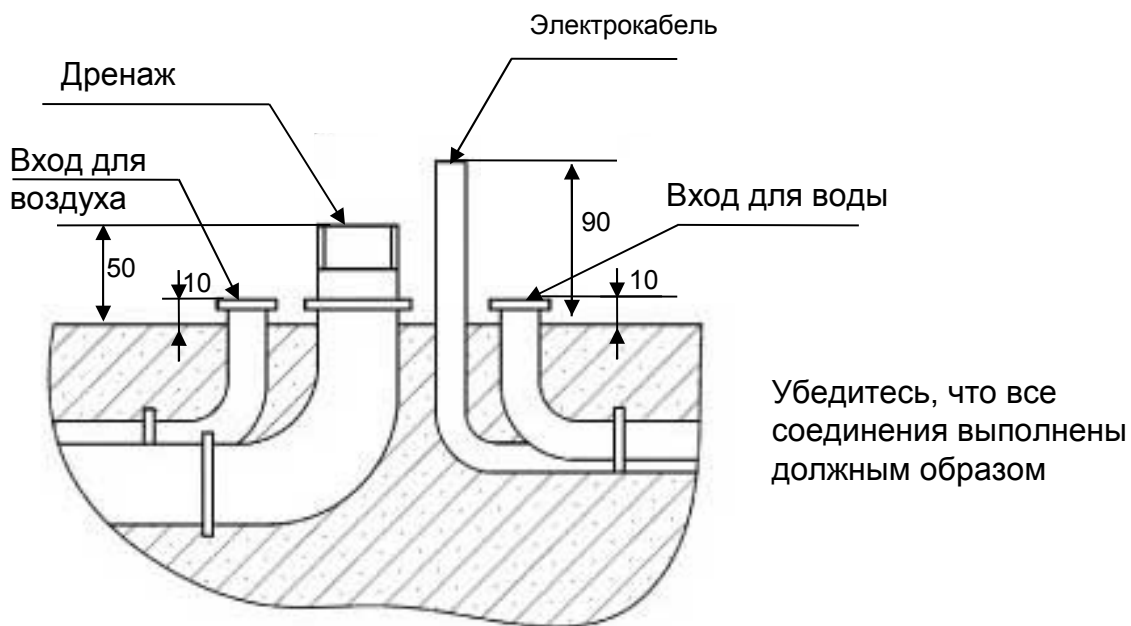


## 1.6 Упаковка

Вариант упаковки I

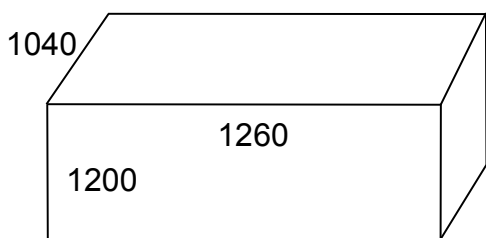

Габариты упаковки

Вариант упаковки II

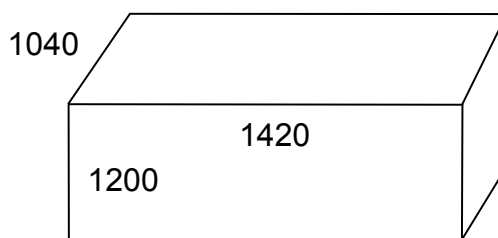

Габариты упаковки




При любом варианте упаковки внутри должна быть сопроводительная документация, в т.ч. Упаковочный лист. Изучите ее внимательно перед монтажем.


## 1.7 Монтаж

А. Присоединить штангу лампы и лампу к гидроблоку.

Вставьте штангу лампы в отверстие в гидроблоке

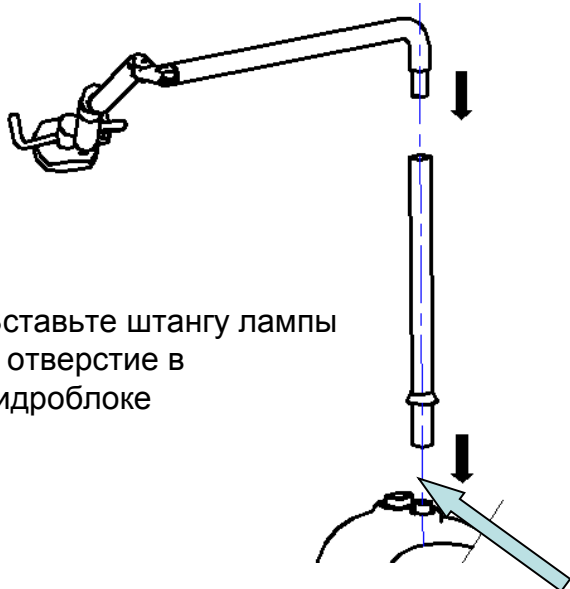


Вставить в плевательницу трубки наполнения и промывки

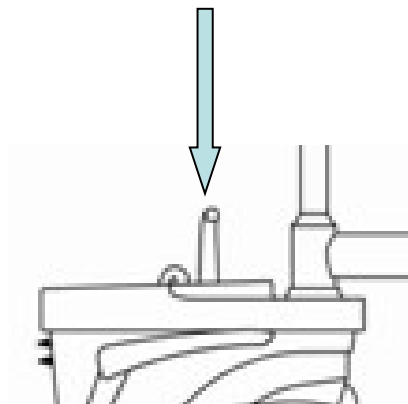


Соедините проводку внутри гидроблока

В. Подсоедините трубки наполнения и промывки к гидроблоку.


С. Вставьте подголовник в отверстие в спинке кресла.

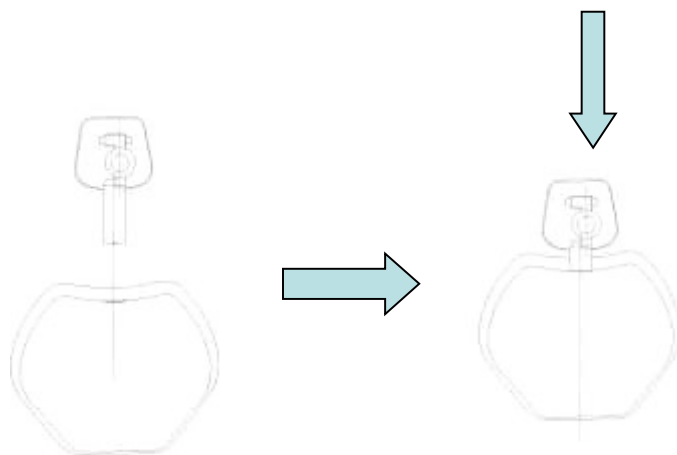

D. Подсоедините мягкую часть кресла к станине установки.

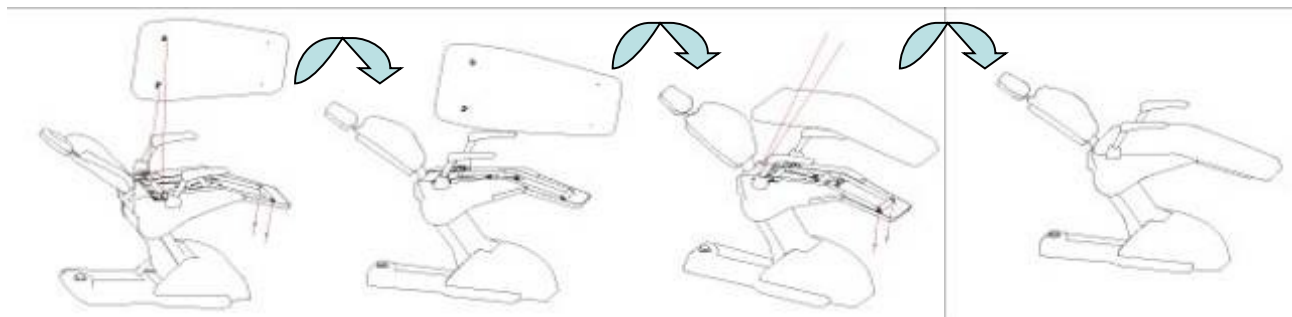

E. Соедините электрокабель, входы на воду, воздух, дренаж к соответствующим выходам.

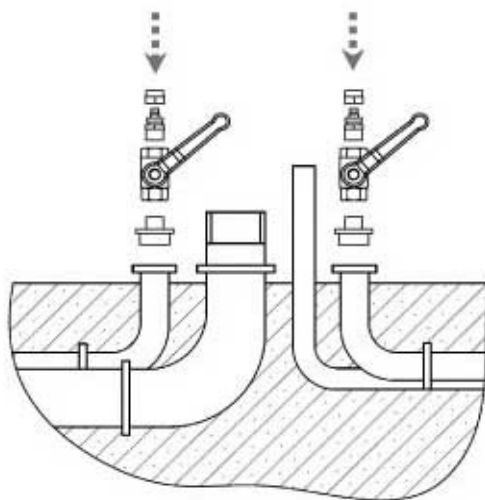

F. Закончите монтаж и проверьте функционирование всех компонентов установки.



H. Проверка функционирования всех компонентов установки должна проводиться в соответствии с Руководством по эксплуатации.

I. Перед проверкой функционирования всех компонентов установки внимательно изучите электрическую схему и схему воздушно-водной цепи.

Мы сохраняем за собой право любых технических изменений и усовершенствований

# Аjax

Guangzhou Ajax Medical Equipment Co., Ltd.

---

Add : No.6, Block 6, Section 12, LingTangXin Road,  
XiaoXinTang, DaGuan Road, Guangzhou, China  
Tel: 86-20-34224030  
Fax: 86-20-34025654  
E-mail: [info@ajaxdent.com](mailto:info@ajaxdent.com)  
[ajax@ajaxdent.com](mailto:ajax@ajaxdent.com)  
<http://www.ajaxdent.com>



## АНХЕЛ

**ООО «Анхел»  
Эксклюзивный дистрибьютор AJAX в России**

410031, Россия, г. Саратов, ул. Валовая, 61/67, оф. 7

т/ф: +7 (8452) 23-00-17, 23-91-29, 28-99-41, 23-93-94

E-mail: [anhelco@mail.ru](mailto:anhelco@mail.ru)

Сайт: [www.anhel.ru](http://www.anhel.ru)