

<http://www.ajaxdent.com>

ajax

Manual

Installation Manual



CE 0197 ISO13485:2003

P/N: 8005383 Version: V1.0 Issue Date: 2009-04-13

Содержание

1. Руководство по монтажу

1.0 Обложка	
1.1 Предостережение	01
1.2 Необходимые инструменты	02
1.3 Описание кнопок управления	03
1.4 Необходимые условия для монтажа	04
1.5 Выбор места монтажа и проверка внешнего вида	05
1.6 Упаковка	06
1.7 Монтаж	07
1.8 Задняя обложка	



Обязательно прочитайте данное
Руководство перед монтажем!

**Руководство по
монтажу
стоматологической
установки AJ 18**

Версия : V1.0

Дата издания : 2009-04-10

1.1 Предостережение





- Внимательно прочитайте данное руководство перед монтажем.
- Входящее напряжение установки 220-230 V ,50/60 Hz.

Убедитесь, что оборудование надежно установлено на полу.


- Подсоединение всех электрокомпонентов должно производиться только уполномоченным техническим специалистом.
- Установка аксессуаров должна производиться только в пределах рекомендованного производителем списка.
- Установка не должна использоваться в условиях сверхвысоких температур, влажности, вибрации, высокого риска воспламенения, ненадежного крепления к полу, чрезмерной запыленности.
- Применению подлежат только рекомендованные производителем запасные части.
- Все движущиеся части установки не должны соприкасаться в пределах радиуса их движения с любыми другими предметами.
- Установка не должна использоваться в условиях сильных электромагнитных колебаний.

1.2 Необходимые инструменты


Подготовьте следующие инструменты для установки:.

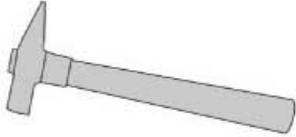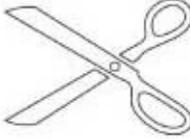	Электродрель		Кусачки
	Молоток		Ножницы
	Уровень		Плоская отвертка
	Крестовая отвертка		Набор угловых ключей 6-гранников
	Набор гаечных ключей		Набор прямых ключей 6-гранников


1.3 Описание кнопок управления

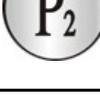Символ	Описание	Символ	Описание
	Настройка		Спинка ВПЕРЕД
	Наполнение стакана		Спинка НАЗАД
	Промывка плевательницы		Кресло ВНИЗ
	Негатоскоп		Кресло ВВЕРХ
	Осветительная лампа		Начальная позиция
	Программируемая позиция 1		Программируемая позиция 2
	Программируемая позиция 3		Позиция для сплевывания в плевательницу
	ВНИМАНИЕ		Регулировка водно- воздушной мощности наконечника
	Защитное заземление		



1.4 Необходимые условия для монтажа

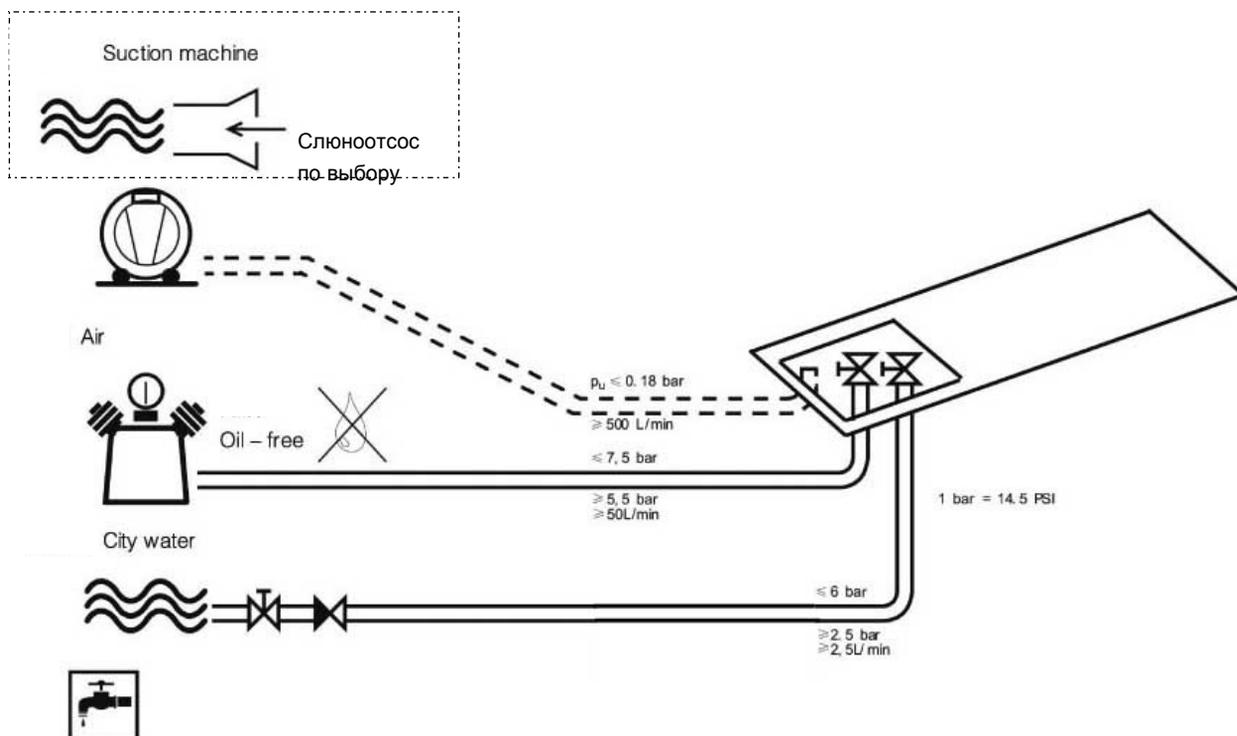

Размеры отверстий для монтажа на
станции установки

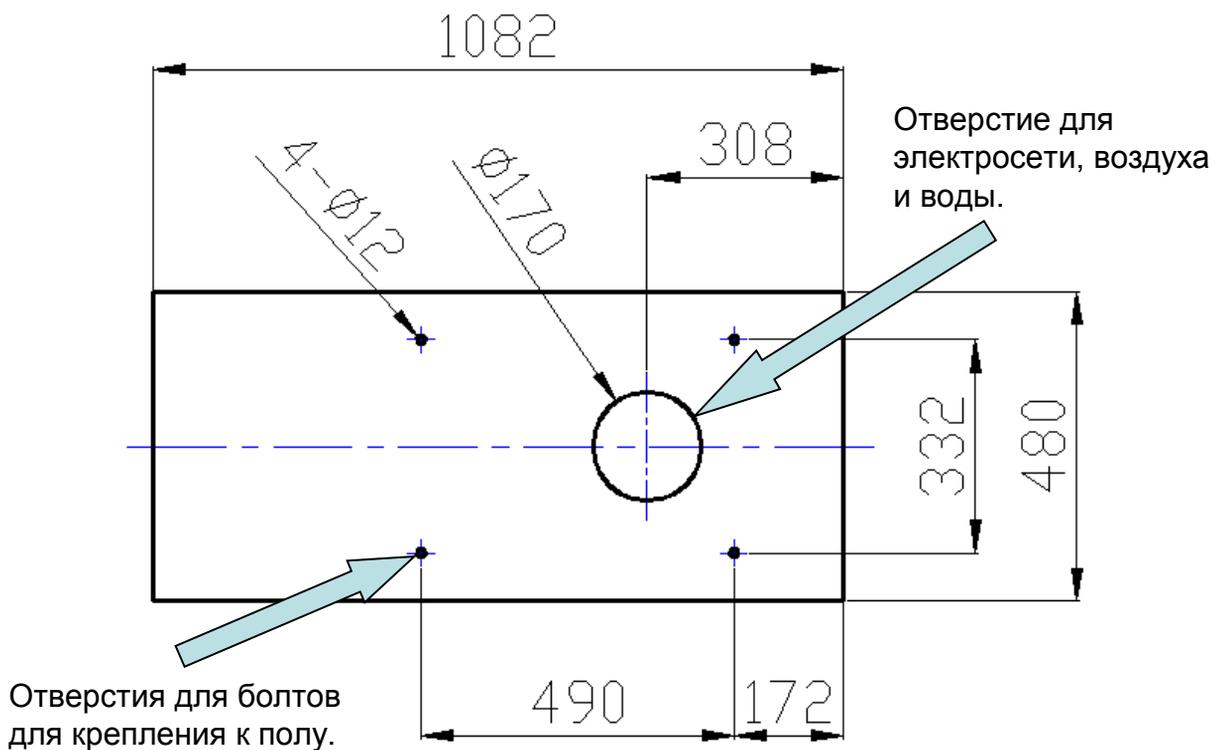


1.5 Выбор места монтажа и проверка внешнего вида

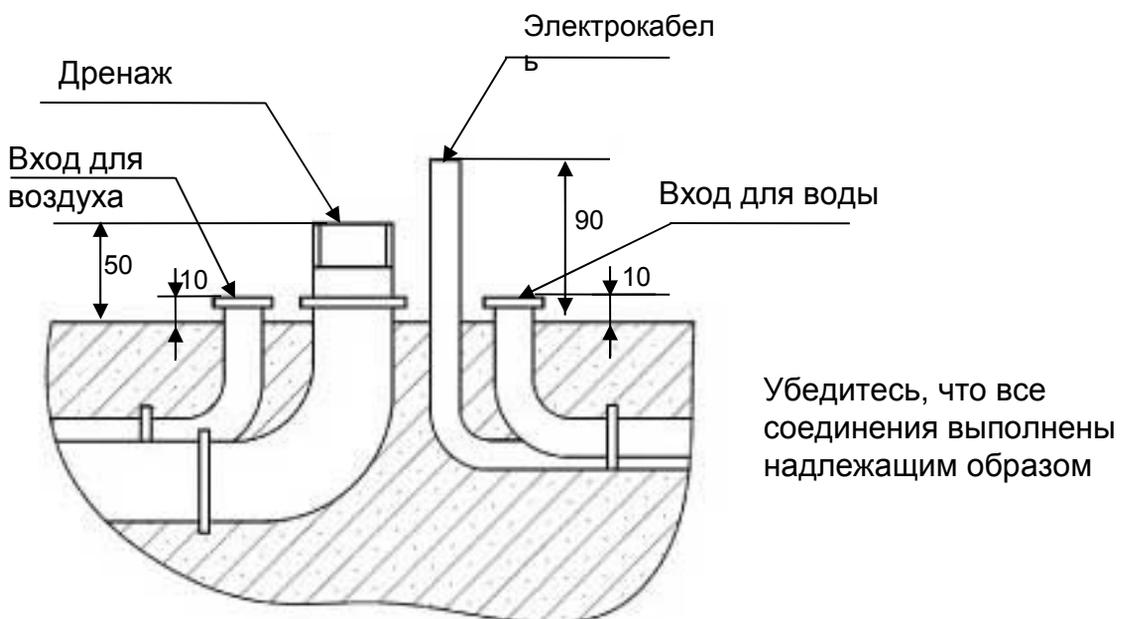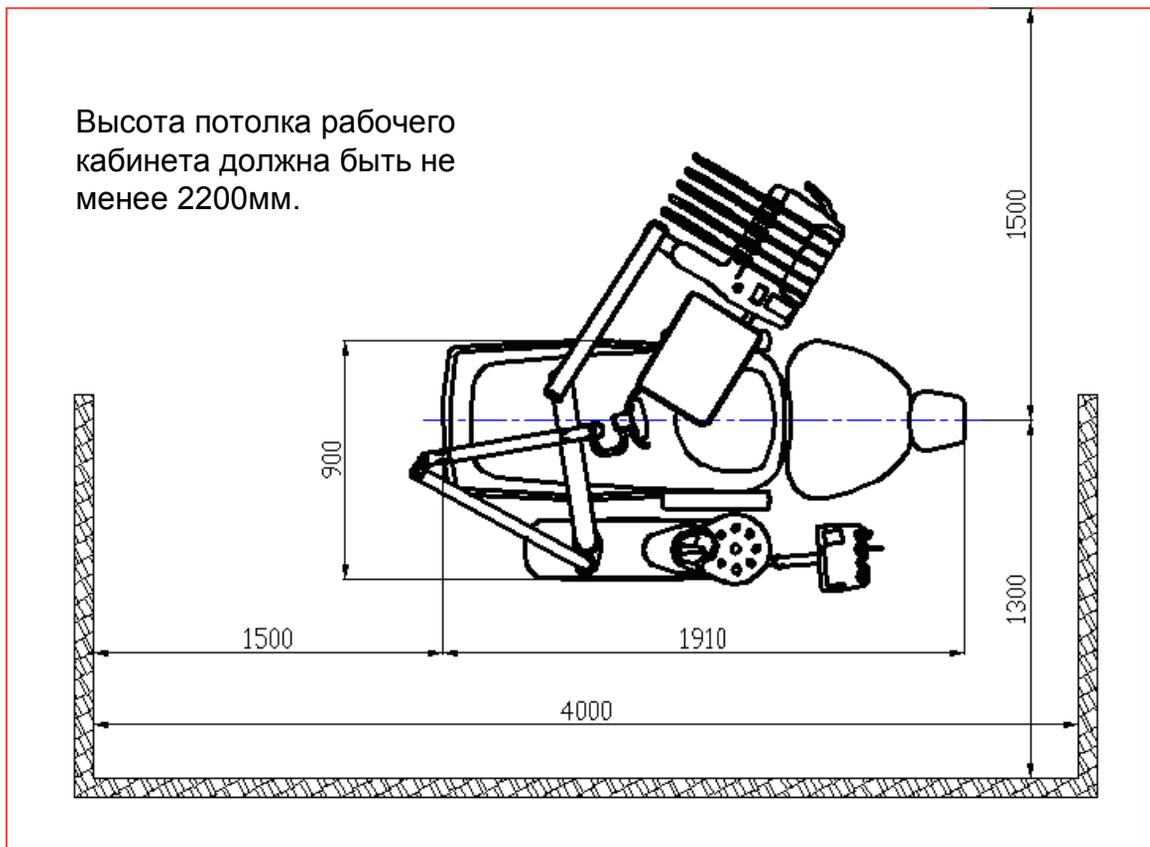


1.6 Упаковка

Вариант упаковки I

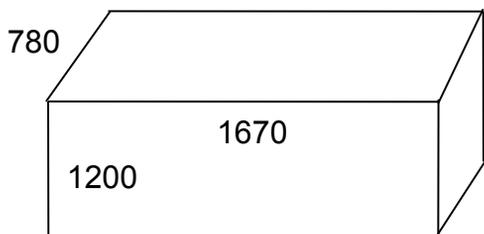


Деревянный ящик для
кресла пациента

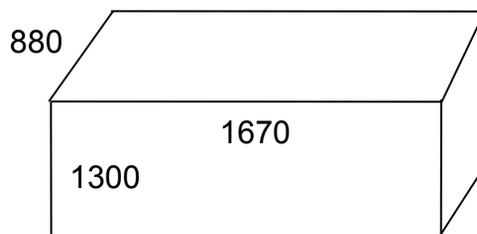

Деревянный ящик
для остальных
компонентов

Вариант упаковки II

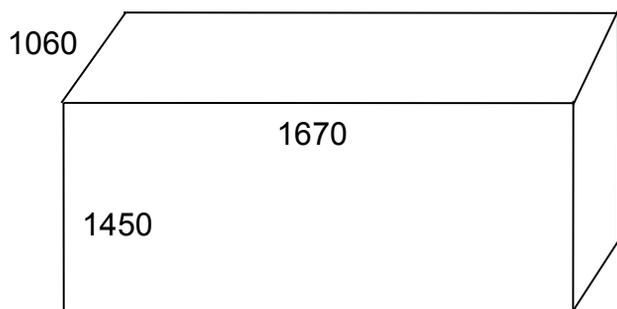


Деревянный ящик для
всей установки



При любом варианте упаковки
внутри должна быть
сопроводительная документация, в
т.ч. Упаковочный лист. Изучите ее
внимательно перед монтажем.

Отдельно возможна
упаковка лампы Faro и
держателя к ней

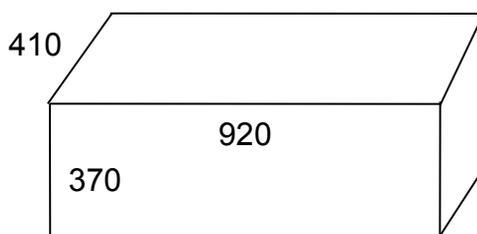


Деревянный ящик для
лампы Faro

Вес: 7.5кг


1.7 Монтаж



А. Закрепите кресло к полу с помощью 4-х болтов.

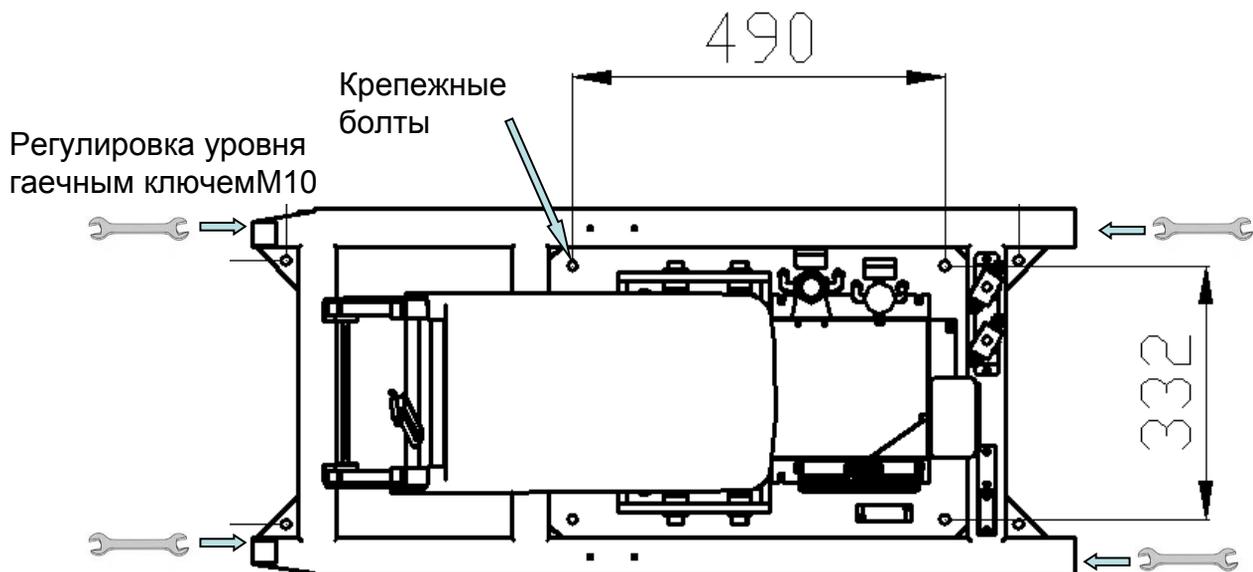

В. Отрегулируйте 4 болта по уровню внутри каркаса установки, чтобы стабилизировать ее.


С. Соедините кабели и трубки между креслом пациента и гидроблоком с помощью разъемов быстрого соединения.

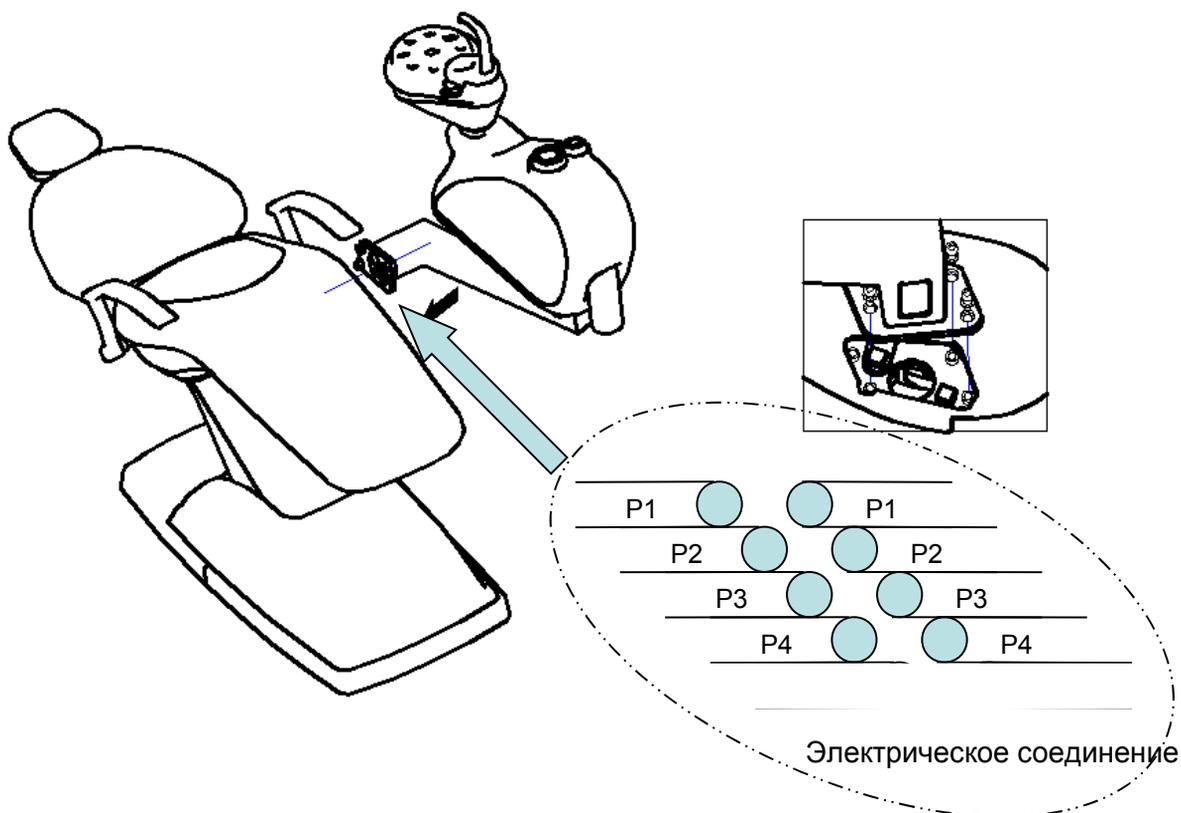

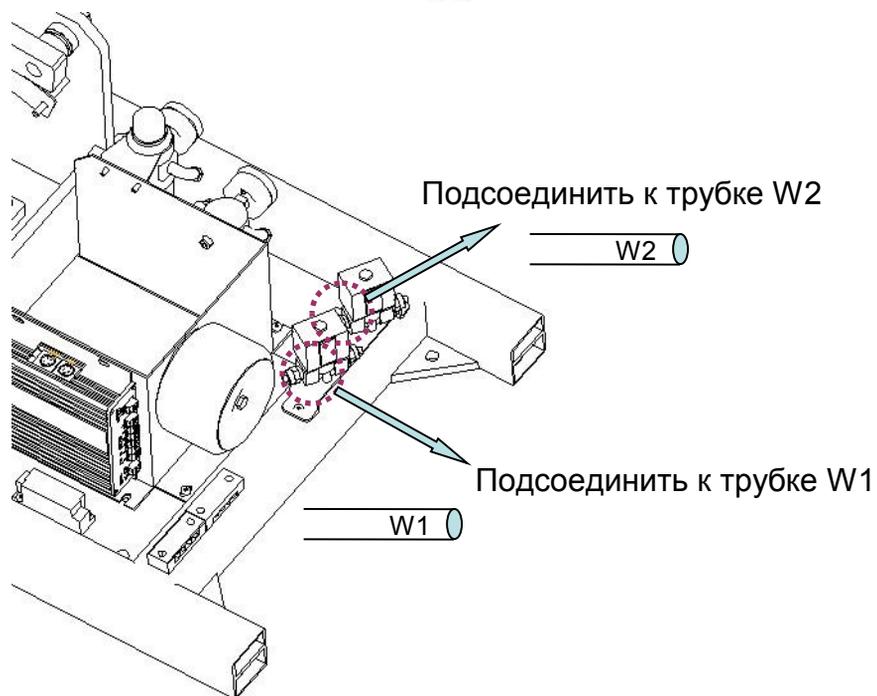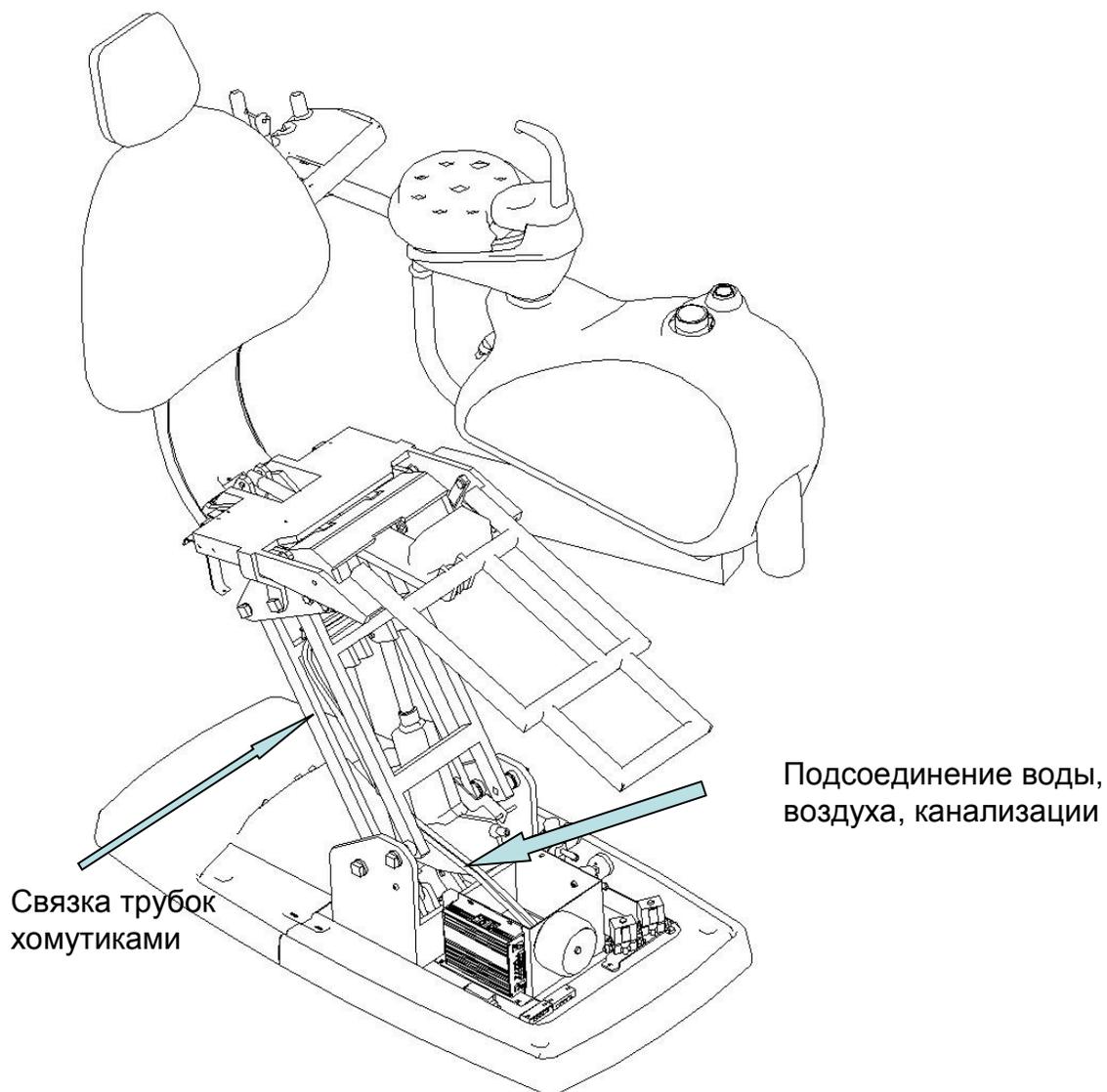




После соединения разъемов к электричеству, воздуху и воде прикрепить гидроблок к креслу 4-мя соединительными болтами

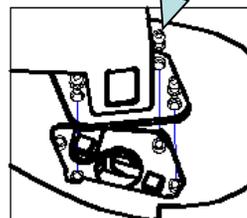



D. Подсоединить штангу лампы и лампу к гидроблоку.

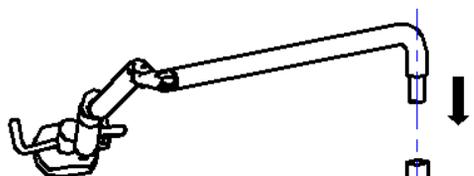

Вставить штангу лампы в отверстие в гидроблоке.


Вставить плевательницу в гидроблок (трубки наполнения и промывки).

↓ Комплектация дезинфекционным колпаком по выбору.

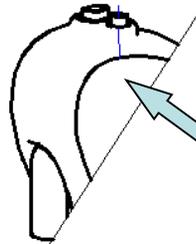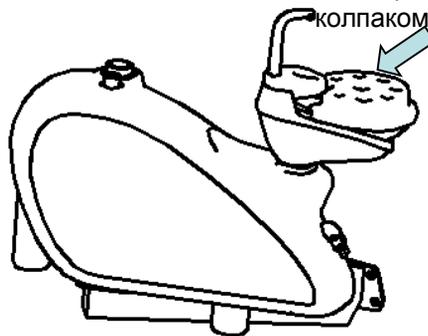


Подсоединить проводку согласно обозначениям внутри гидроблока.

Е. Проверьте с помощью уровня горизонтальный наклон гидроблока и модуля врача.

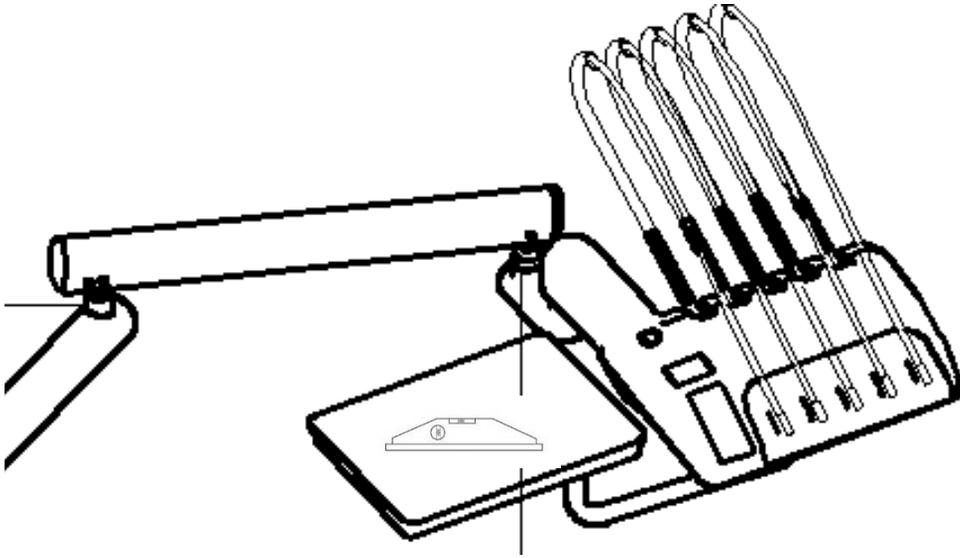

Ф. Подсоедините электрокабель, водную, воздушную и дренажную трубки к соответствующим разъемам.

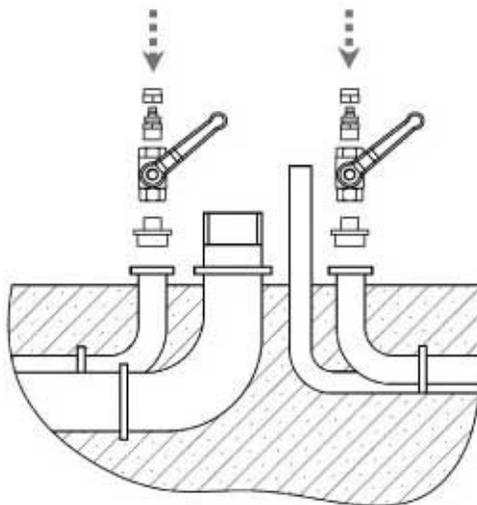

Г. Закончите монтаж и проверьте функционирование всех компонентов установки.



Н. Проверка функционирования всех компонентов установки должна проводиться в соответствии с Руководством по эксплуатации.

І. Перед проверкой функционирования всех компонентов установки внимательно изучите электрическую схему и схему воздушно-водной цепи.

Мы сохраняем за собой право любых технических изменений и усовершенствований

Аjax

Guangzhou Ajax Medical Equipment Co., Ltd.

Add : No.6, Block 6, Section 12, LingTangXin Road,
XiaoXinTang, DaGuan Road, Guangzhou, China
Tel: 86-20-34224030
Fax: 86-20-34025654
E-mail: info@ajaxdent.com
ajax@ajaxdent.com
<http://www.ajaxdent.com>



АНХЕЛ

ООО «Анхел»
Эксклюзивный дистрибьютор AJAX в России

410031, Россия, г. Саратов, ул. Валовая, 61/67, оф. 7

т/ф: +7 (8452) 23-00-17, 23-91-29, 28-99-41, 23-93-94

E-mail: anhelco@mail.ru

Сайт: www.anhel.ru